

说明书

【产品名称】 手指固定器

【产品通用名】 拇指固定器 W4

【产品型号】 31903&31904

【产品规格】 S, M, L

【产品性能结构及组成】 骨科、康复科康复工具，可重复使用。该产品通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。

【预期用途】

拇指关节的固定支撑。

【适用症】

- 轻至中度拇指关节扭伤或拉伤
- 腕关节术后愈合及其他软组织损伤恢复固定支撑

【产品特点】

产品轻便，穿戴简易。

【使用方法】

请在医生或专业人员指导下使用。

【穿戴步骤】

注意：

穿戴此产品前请先仔细检查各个部位是否安全可靠，如发现问题应及时修理或更换，产品的穿戴时间和注意事项请遵医嘱。

使用方法：

先依据患者的骨折或错位部位选择相应部位，大小合适的支具，再将选择好的支具的粘扣打开，将患者错位或骨折部位复位后加垫纱布或医用棉纸套入支具内，然后将粘扣搭紧即可。

【注意事项】

- 1、应遵医嘱。
- 2、要经常检查各个部位是否牢固、粘扣、金属等是否安全可靠，如发现问题应及时修理或更换。
- 3、训练时间应根据医生或康复训练师嘱咐训练。
- 4、使用过程中如出现疼痛或感觉异常，请立即停止使用并联系您的医生。

【禁忌症】

- 1) 有出血倾向者禁用。
- 2) 恶性肿瘤及高热患者禁用。
- 3) 严重高血压及心血管疾病患者慎用。
- 4) 有严重皮肤过敏者禁用。

【储存方法】 应存放在干燥和通风良好的室内，勿与酸、碱等腐蚀性物质混放，远离火源。

【清洗、保养方法】 用湿布和温和的清洁剂清洁护具。存放于通风干燥处，防止日光暴晒注意防潮。

【有效期】 3年

深圳简单医疗科技有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路 1010 号智慧谷创新园 519

电话：0755-86038563 传真：0755-86038509

网址：<http://www.simplemedical.cn>

生产备案证编号：粤深食药监械生产备 20170002 号

产品备案证编号：粤深械备 20190644

医疗器械产品技术要求编号：粤深械备 20190644

说明书修订日期：2020 年 07 月 24 日